



Podmiot prowadzący reklamę: Alpinus Chemia Sp. z o.o.



ALPINUSEPTOL

Szybkodziałający, dezynfekujący
preparat alkoholowy



Producent: Alpinus Chemia Sp. z o.o.

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE
Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ**



Bezaldehydowy preparat na bazie alkoholu przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni w tym także nieinwazyjnych wyrobów medycznych.

PRZEZNACZENIE:

Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych w obszarze medycznym – obiektach służby zdrowia, szpitalach, gabinetach lekarskich i stomatologicznych, przychodniach zdrowia, domach opieki, sanatoriach, w obiektach użyteczności publicznej, w gabinetach usługowych - salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich i kosmetycznych, gabinetach masażu, hotelach, obiektach gastronomicznych i w przemyśle spożywczym.

Preparat do dezynfekcji powierzchni maszyn i urządzeń oraz powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu takich jak: aparatura medyczna, łóżka i fotele zabiegowe, sprzęt rehabilitacyjny, szafki pacjenta, poręcze łóżek szpitalnych, blaty stołów medycznych. Preparat przeznaczony również do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością takich jak blaty, stoły, szafki, klamki, uchwyty, parapety, szyby, fotele, sprzęt sportowy, blaty medyczne, szafki pacjenta oraz akcesoria fryzjerskie i kosmetyczne.

Właściwości	Korzyści
Gotowy do użycia	Szybkość i wygoda stosowania
Szerokie spektrum działania już w czasie 15 sekund	Oszczędność czasu z jednoczesną gwarancją skuteczności
Przebadany dermatologicznie	Gwarancja bezpieczeństwa personelu i pacjentów
Bez zawartości aldehydów, fenoli, chloru, kwasów, etc.	Efekt dezynfekcji bez odbarwień
Szybkoschnący	Efekt dezynfekcji bez plam, zacieków i smug

Substancja czynna:

etanol*	72 g/100 g wyrobu
---------	-------------------

* alkohol etylowy denaturowany nie przeznaczony do konsumpcji

ZAŁECENIA:

- Nie stosować do inwazyjnego sprzętu medycznego.
- Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholu (np. pleksiglas).
- Powierzchnia dezynfekowana powinna pozostać wilgotna przez okres ekspozycji.
- Przed procesem dezynfekcji urządzenia elektryczne muszą być odłączone od zasilania.
- Gorące powierzchnie muszą być schłodzone przed aplikacją produktu.

SPOSÓB UŻYCIA:

Roztwór gotowy do użycia, do spryskiwania lub przecierania. Stosować bez rozcieńczania. Dezynfekowaną powierzchnię całkowicie pokryć preparatem przy użyciu spryskiwacza z odległości ok. 30 cm i pozostawić do wyschnięcia lub położyć powierzchnię dbając o całkowite pokrycie dezynfekowanego obszaru (30-50ml/m²), następnie przetrzeć jednorazowym ręcznikiem. Sprzęty i powierzchnie po wykonanej dezynfekcji, nie wymagają spłukiwania wodą. Dezynfekcję prowadzić w temperaturze pokojowej (ok. 20°C) w czasie kontaktu odpowiednim dla badań mikrobiologicznych Stosować każdorazowo w razie potrzeby dezynfekcji.

INFORMACJE DODATKOWE:

- Preparat przeznaczony do zastosowania przez profesjonalnego użytkownika.
- Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.
- Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik ma miejsce zamieszkania.
- Etykieta wyrobu stanowi instrukcję używania. Jej elektroniczna wersja dostępna jest na stronie internetowej producenta wraz z kartą charakterystyki wyrobu.

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE:

Organizm	Norma	Czas
bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	15 sek. ^{1,2}
bakterie (w tym MRSA)	EN 16615	30 sek. ^{1,2}
bakterie (w tym MRSA)	EN 13697	60 sek. ^{1,2}
grzyby (C. albicans)	EN 13624	15 sek. ^{1,2}
grzyby (C. albicans)	EN 16615	30 sek. ^{1,2}
grzyby (Aspergillus niger)	EN 13624	15 sek. ^{1,2}
grzyby (C. albicans, Aspergillus niger)	EN 13697	60 sek. ^{1,2}
prątki (M. terrae)	EN 14348	30 sek. ^{1,2} 60 sek. ²
prątki (M. avium)	EN 14348	60 sek. ²
wirusy – pełne działanie wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro w tym wirusy otoczkowe HAV, HBV, HCV, HIV, Herpesviridae)	EN 14476	15 sek. ^{1,2}

¹ w warunkach niskiego obciążenia organicznego

² w warunkach wysokiego obciążenia organicznego

KONFEKCJONOWANIE:

Jednostkowe	Zbiornicze
butelka 250ml z atomizerem	40 x 250 ml
butelka 500 ml z nakrętką, opcjonalnie ze spryskiwaczem	15 x 500 ml
butelka 1000 ml z nakrętką, opcjonalnie ze spryskiwaczem	12 x 1000 ml
kanister 5000 ml z wygodną rączką	6 x 5000 ml, 4 x 5000 ml

Wersje zapachowe: NEUTRAL, GREEN TEA

Termin ważności: 3 lata od daty produkcji.

Data opracowania: 02.2026, PL, rev.2

Wyrób medyczny klasy II a w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych.

Przeznaczony do dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych.

Wyrób wytwarzany zgodnie z ISO 13485

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania z preparatem są dostępne w karcie charakterystyki wyrobu.

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 8363/21

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.

Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.