



ALPINUS



alpinus
medica



MEDILL
Alkoholowy, szybko-
działający preparat
dezynfekcyjny



Bezaldehadowy preparat na bazie alkoholu przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych.

PRZEZNACZENIE:

Preparat przeznaczony do dezynfekcji **wyłącznie** powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu **takich jak:** aparatura medyczna, łóżka i fotele zabiegowe, sprzęt rehabilitacyjny, szafki pacjenta, poręcze łóżek szpitalnych, blaty stołów medycznych. Preparat można stosować do szybkiej dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych.

Właściwości	Korzyści
Gotowy do użycia	Szybkość i wygoda stosowania
Przebadany zgodnie z normą EN 14885	Gwarancja bezpiecznego stosowania
Na bazie alkoholu	Doskonała tolerancja przez personel i pacjentów
Szerokie spektrum działania	Oszczędność czasu z jednoczesną gwarancją skuteczności
Bez zawartości aldehydów, QAV, fenoli, chloru, kwasów, etc.	Efekt dezynfekcji bez odbarwień
Szybkoschnący	Efekt dezynfekcji bez plam, zacieków i smug

SPOSÓB UŻYCIA:

Roztwór gotowy do użycia, do spryskiwania lub przecierania. Dezynfekowaną powierzchnię całkowicie pokryć preparatem przy użyciu spryskiwacza z odległości ok. 30 cm i pozostawić do wyschnięcia lub polać powierzchnię dbając o całkowite pokrycie dezynfekowanego obszaru i następnie przetrzeć jednorazowym ręcznikiem. W przypadku dezynfekcji urządzeń elektrycznych zawsze sprawdzić odłączenie aparatu od sieci.

PRZECIWWSKAZANIA:

- Nie stosować do inwazyjnego sprzętu medycznego.
- Nie stosować na powierzchni nieodporne na działanie alkoholu (np. pleksiglas).

Substancja czynna:

etanol*	90 g/100 g wyrobu
---------	-------------------

* alkohol etylowy denaturowany nie przeznaczony do konsumpcji

INFORMACJE DODATKOWE:

- Wyrób przeznaczony do zastosowania przez profesjonalnego użytkownika.
- Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

organizm	norma	czas
bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	30 sek. ¹
grzyby (C. albicans)	EN 13624	30 sek. ¹
grzyby (Aspergillus niger)	EN 13697	5 min. ¹
prątki (M. terrae)	EN 14348	30 sek. ¹
wirusy RNA bezotczkowe (Polio)	EN 14476	5 min. ¹
wirusy DNA bezotczkowe (Adeno)	EN 14476	5 min. ²

¹ w warunkach niskiego obciążenia organicznego
² w warunkach wysokiego obciążenia organicznego

KONFEKcjonowanie:

jednostkowe	zbiorcze
butelka 1000 ml z bezpieczną nakrętką	12 x 1000 ml
butelka 1000 ml ze spryskiwaczem	12 x 1000 ml
kanister 5000 ml z wygodną rączką	6 x 5000 ml

Okres gwarancji/termin ważności: 3 lata od daty produkcji. Data opracowania: 06.2019, PL rev. 1

Wyrób wytwarzany zgodnie z ISO 13485
 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania z preparatem są dostępne w karcie charakterystyki wyrobu.

